

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Салфетки проспиртованные MR

Варианты исполнения:

- в индивидуальной упаковке размер 30*65мм.
- в индивидуальной упаковке размер 56*65мм.
- в индивидуальной упаковке размер 60*100мм.
- в индивидуальной упаковке размер 110*125мм.
- в индивидуальной упаковке размер 135*185мм.



Состав: нетканый материал, спирт изопропиловый 70%

Применять наружно для обработки кожи до и после инъекций, для первичного снятия загрязнений с неповрежденной кожи, а также обработки поверхностей медицинских устройств и оборудования

- Проверить целостность упаковки и срок годности изделия.
- Вскрыть индивидуальную упаковку.
- Достать салфетку, произвести необходимые манипуляции.
- Использованную салфетку и упаковку утилизировать

Меры предосторожности: Не обрабатывать раны и слизистые. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При возникновении раздражения прекратить использование и обратиться к врачу.

Предупреждения:

-  - для однократного применения
-  - не использовать при нарушении целостности упаковки

Хранить при температуре от -25 С до +45 С и относительной влажности не более 80%

Срок годности: 3 года (дата изготовления указана на упаковке)
РУ РЗН 2014/1872 от 19.01.2021

Производитель: «НИНГБО ХАЙ-ТЕК ЮНИКМЕД ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО.» ЛТД, Китай, NINGBO HI-TECH UNICMED IMP.&EXP.CO.,LTD,11/F, Green Town Lvyuan Tower, 588 Canghai Road, 315040 Ningbo, China

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ по вопросам полного обращения медицинских изделий:
ООО "MR МЕД", Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала д.93 А, литер А, пом. 1045