



MR MED

MR MED

191119, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала 93 А , пом. 1235

Тел.: +7 (812)-647-74-47 e-mail: commerce@med-mr.com

сайт [http:// med-mr.com](http://med-mr.com)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Мочеприемники MR

Мочеприемник педиатрический MR 100 мл

Предназначен для сбора мочи у пациентов в стационарных и амбулаторных условиях

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- проверить целостность упаковки и срок годности изделия
- аккуратно вскрыть индивидуальную упаковку, извлечь мочеприемник
- снять защитную бумажную ленту с фиксирующего липкого слоя
- приклеить мочеприемник к половому органу ребенка (у мальчиков мошонку поместить внутрь мочеприемника)
- после сбора мочи снять мочеприемник
- отрезать уголок мочеприемника и слить в емкость для транспортировки

ВНИМАНИЕ!

Не оставлять прикрепленным мочеприемник более 1 часа.

В случае, если не удалось собрать мочу в течение 1 часа, снять мочеприемник и использовать новый

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Индивидуальная непереносимость

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:



-для однократного применения



- не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки



-не стерилизовать повторно



-стерилизовано оксидом этилена

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

- хранить при температуре от -25 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80%, избегать резкого перепада температуры

Срок годности 5 лет (дата изготовления указана на упаковке)

РУ №РЗН 2017/6189 от 04.09.2017

Производитель

НИНГБО ХАЙ-ТЕК ЮНИКМЕД ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД",
Китай, NINGBO HI-TECH UNICMED IMP.& EXP. CO., LTD, 11/F, Green
Town Lvyuan Tower, 588 Canghai Road, 315040 Ningbo, P.R China

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО "MR MED"