

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Мочеприемники MR

Мочеприемник прикроватный MR 1000 мл

Предназначен для сбора мочи у пациентов в стационарных и амбулаторных условиях




СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- проверить целостность упаковки и срок годности изделия
- надеть перчатки после предварительной обработки рук
- аккуратно вскрыть индивидуальную упаковку, извлечь мочеприемник
- удостовериться, что клапан выпускного отверстия закрыт
- зафиксировать мочеприемник в вертикальном положении на кровать, стойку и др. держатель таким образом, чтобы обеспечить свободный ток мочи.
- * Мочеприемник всегда должен располагаться ниже уровня мочевого пузыря.
- снять защитный колпачок с коннектора на трубке мочеприемника, подсоединить коннектор к мочевому катетеру
- использовать шкалу на передней поверхности мочеприемника для считывания показаний заполнения мочеприемника мочой
- для опорожнения мочеприемника: удерживая мочеприемник над емкостью, открыть клапан выпускного отверстия, когда мешок станет пустым, снова закрыть клапан выпускного отверстия
- производить своевременную замену мочеприемника
- обработать и утилизировать в установленном порядке

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Индивидуальная непереносимость

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

-  - для однократного применения
-  - не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки
-  - не стерилизовать повторно

 - стерилизовано оксидом этилена

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

- хранить при температуре от -25 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80%, избегать резкого перепада температуры

Срок годности 5 лет (дата изготовления указана на упаковке)

РУ №РЗН 2017/6189 от 04.09.2017

Производитель

НИНГБО ХАЙ-ТЕК ЮНИКМЕД ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД",
Китай, NINGBO HI-TECH UNICMED IMP.& EXP. CO., LTD, 11/F, Green
Town Lvyuan Tower, 588 Canghai Road, 315040 Ningbo, P.R China

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО "MR MED"

MR MED MR MED

191119, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала 93 А , пом. 1235

Тел.: +7 (812)-647-74-47 e-mail: commerce@med-mr.com

сайт [http:// med-mr.com](http://med-mr.com)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Мочеприемники MR

Мочеприемник прикроватный MR 2000 мл

Предназначен для сбора мочи у пациентов в стационарных и амбулаторных условиях

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- проверить целостность упаковки и срок годности изделия
- надеть перчатки после предварительной обработки рук
- аккуратно вскрыть индивидуальную упаковку, извлечь мочеприемник
- удостовериться, что клапан выпускного отверстия закрыт
- зафиксировать мочеприемник в вертикальном положении на кровать, стойку и др. держатель таким образом, чтобы обеспечить свободный ток мочи.

* Мочеприемник всегда должен располагаться ниже уровня мочевого пузыря.

- снять защитный колпачок с коннектора на трубке мочеприемника, подсоединить коннектор к мочевому катетеру
- использовать шкалу на передней поверхности мочеприемника для считывания показаний заполнения мочеприемника мочой
- для опорожнения мочеприемника: удерживая мочеприемник над емкостью, открыть клапан выпускного отверстия, когда мешок станет пустым, снова закрыть клапан выпускного отверстия

- производить своевременную замену мочеприемника
- обработать и утилизировать в установленном порядке

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Индивидуальная непереносимость

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:



- для однократного применения



- не использовать при нарушении целостности стерильной упаковки



- не стерилизовать повторно



-стерилизовано оксидом этилена

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

- хранить при температуре от -25 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80%, избегать резкого перепада температуры

Срок годности 5 лет (дата изготовления указана на упаковке)

РУ №РЗН 2017/6189 от 04.09.2017

Производитель

НИНГБО ХАЙ-ТЕК ЮНИКМЕД ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД",
Китай, NINGBO HI-TECH UNICMED IMP.& EXP. CO., LTD, 11/F, Green
Town Lvyuan Tower, 588 Canghai Road, 315040 Ningbo, P.R China

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО "MR MED"